

Alta frecuencia con electrodo de triple acción de uso dermatocosmético.

Cuenta con un selector de doble frecuencia: (Frecuencia normalizada y frecuencia muy elevada) para distintos tipos de pieles.



Funcionamiento

Empleando electrodos de vidrio que en su interior acumulan gas, se logra que a nivel de la piel, se generen infinidad de pequeños impulsos, las que a su vez, originan un efecto de micromasaje y una dosis mínima de radiación ultravioleta. Se produce así un enrojecimiento cutáneo (eritema) por aumento del flujo sanguíneo, así como de la temperatura en forma localizada (hipertermia).

Al ser aplicado sobre la piel, el electrodo de vidrio genera gas ozono. El ozono produce lipoperoxidación de las grasas, atacando los lípidos de la superficie cutánea que se encuentran en el cuero cabelludo y la piel. De este efecto surge la potente acción bactericida además del incremento de la temperatura y vasodilatación local, con el consecuente aumento de la irrigación, oxigenación y nutrición de los tejidos tratados.

MEDITEA





Electrodo de triple acción



Resultados

Aumento de la nutrición y oxigenación de la piel, estimulándola y haciéndola recobrar paulatinamente todos los valores nutritivos y metabólicos. Por este medio se combaten eficazmente alteraciones y desequilibrios del tipo senil y prematuro a nivel cutáneo-arrugas, piel apergaminada, pérdida de humectación natural, déficit sanguíneo, etc.

Formas de aplicación

Para una aplicación segura se recomienda utilizarlo con movimientos de rotación hasta observar hipermia y/o eritema localizado.

